



Nessun codice necessario

Quantità di sangue per campione – 0,5 µL

Tempo del test – 6 secondi*

Memoria – 300 test

www.bgstar.it

Per domande di tipo tecnico:

Numero Verde
800-131212

In caso di emergenza, contattare il medico o il pronto soccorso.

IMPORTANTE: Fare riferimento al manuale per l'uso iBGStar® per una descrizione passo per passo più dettagliata sull'esecuzione del test.

Passaggi dell'esecuzione di un test della glicemia


(Per le istruzioni complete, fare riferimento al manuale per l'uso iBGStar®)

Fare riferimento al manuale per l'uso iBGStar® per:

- Esecuzione di un test senza utilizzo dell'applicazione iBGStar® Diabetes Manager
- Installazione dell'applicazione iBGStar® Diabetes Manager
- Sincronizzazione preliminare
- Impostazione preliminare di data e ora

1 Lancio dell'applicazione e connessione

Toccare l'icona iBGStar Diabetes Manager sul proprio iPhone o iPod touch per lanciare l'applicazione.

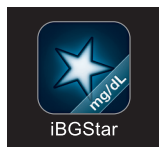

Collegare il dispositivo all'iPhone o all'iPod touch, collegando il connettore dock del dispositivo alla porta per connettore dock dell'iPhone o dell'iPod touch.



2 Inserire una nuova striscia reattiva nello strumento

Inserire la striscia reattiva, con l'area reattiva rivolta verso l'alto, nell'apertura per l'inserimento delle strisce. Lo strumento verrà attivato automaticamente.

ATTENZIONE: per assicurare risultati accurati, lavarsi le mani con acqua tiepida e sapone e asciugarle prima di ogni test.



3 Pungere l'area di prelievo

Fare riferimento alle istruzioni per la preparazione del pungidito, sulla destra.

Premere il pungidito contro l'area da pungere. Premere il pulsante di rilascio.



4 Spremere la goccia di sangue

Eliminare la prima goccia di sangue estratta utilizzando un panno o un fazzoletto di carta puliti.

Comprimere dalla base del dito verso l'alto in direzione del polpastrello finché non fuoriesce un'altra goccia di sangue.



Strumento

- 1) Copertura connettore dock
- 2) Connettore dock
- 3) Display
- 4) Pulsante di rilascio
- 5) Porta micro USB
- 6) Apertura per l'inserimento delle strisce




Striscia reattiva

- 1) Area reattiva
- 2) Indicatore visivo
- 3) Area di campionamento



Pungidito


- 1) Leva di caricamento
- 2) Quadrante di regolazione della profondità
- 3) Indicatore di profondità
- 4) Pulsante di rilascio
- 5) Supporto lancetta
- 6) Cappuccio del pungidito
- 7) Cappuccio per prelievo da aree alternative
- 8) Lancetta
- 9) Cappuccio della lancetta

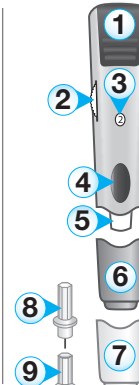


Con il sistema iBGStar® è possibile eseguire un test della glicemia utilizzando campioni ematici prelevati dai polpastrelli, dai palmi delle mani (alla base del pollice) e dagli avambracci (fare riferimento al manuale per l'uso per i siti di prelievo esatti).

5 Portare la striscia reattiva a contatto con il campione ematico

La striscia reattiva assorbe il sangue all'interno della striscia attraverso l'area di campionamento.

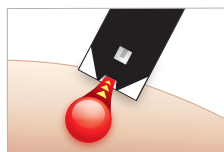

6 Rimuovere la striscia reattiva dal campione ematico non appena l'indicatore visivo della striscia diventa completamente rosso

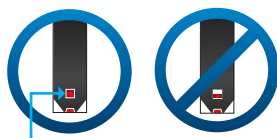

L'indicatore visivo diventerà completamente rosso.

Il simbolo Campione applicato apparirà sul display del dispositivo; allo stesso tempo, l'iPhone o l'iPod touch emetteranno un segnale acustico in seguito alla rimozione della striscia reattiva dal campione ematico.

(Il segnale acustico - in caso di attivazione dei suoni - verrà emesso soltanto se il dispositivo sarà connesso a un iPhone o a un iPod touch e se l'applicazione sarà attiva).

7 Operazioni finali


Il test è terminato quando il risultato del test della glicemia viene visualizzato sul display.



Rimuovere la striscia reattiva usata. Lo strumento verrà disattivato automaticamente. Rimuovere il cappuccio del pungidito. Riposizionare il cappuccio della lancetta. Rimuovere la lancetta usata. Smaltire correttamente la striscia reattiva usata e la lancetta.

Preparazione del pungidito


1 Rimuovere il cappuccio del pungidito.

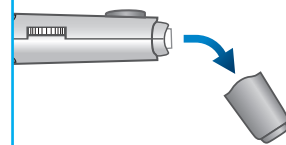


2 Inserire saldamente una nuova lancetta nel supporto per lancette.



3 Ruotare il cappuccio della lancetta fino a staccarlo.

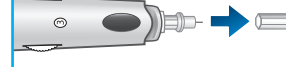

4 Reinserire il cappuccio del pungidito.

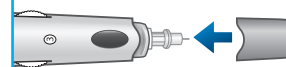

5 Impostare il livello del pungidito.



6 Estrarre la leva di caricamento finché non scatta.

